

# MID-TUBE<sup>®</sup>

REF

MID130

REF

MID136

REF

MID131



MN- Заавар үхуулах хуудас MID-TUBE, orogastric шалгалт тохируулгын хоолой

1

## 1. ХЭРЭГЛЭХ ЗААЛТ

MID-TUBE, oogastric тохируулгын гуурс хоолой нь ходоодны болон ходоод тайрах мэс заслын үйл ажиллагаанд ходоодны харагдахуйц, хүрэлцэхүйц шугамыг тодорхойлж, ходоодыг задлах, ходоодны шингэнийг гадагшуулах, зайлуулах тохируулах чадвартай.

MID-TUBE, ходоод тайрах хэмжээ багасгах мэс засал (жишээлбэл, ходоодны тойрог зам, ханцуйны гэдэс хагалгаа ...) эсвэл ходоодны хагалгаанд (жишээлбэл Fundoplication, Gastrectomy ...) ашиглаж болно.

MID-TUBE бүтээгдэхүүнийг 3 размеараар авах боломжтой

## 2. MID- TUBE БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ШИНЖ ЧАНАР

	MID-TUBE ref. MID130	MID-TUBE ref. MID136	MID-TUBE ref. MID131
Ашигласан материал :	Силикон	Силикон + Цэнхэр үзүүр	Силикон + Цэнхэр үзүүр
Гуурсны урт :	800 +/- 5mm	800 +/- 5mm	791 +/- 5mm
Гуурсныгадна диаметр	12.8 +/- 0.2mm (38 french)	12 +/- 0.2mm (36 french)	16 +/- 0.2mm (48 french)
Гуурсныдотор диаметр:	7.8 +/- 0.2mm	7 +/- 0.2mm	8 +/- 0.2mm

## 3. ЭСРЭГ ЗААЛТ

Дараахь тохиолдолд MID-TUBE-ийг ашиглахыг хориглоно

- Бүтээгдэхүүний материал даршил өгөх эрсдэлтэй өвчтөнүүд - хатуу силикон.
- Улаан хоолойн эмгэг, эмгэг: Улаан хоолойн судас, улаан хоолойн дивертикул, улаан хоолойн хавдар, улаан хоолойн түгжрэл.
- Цус бүлэгнэлтийн эмгэг.
- Ерөнхийдөө эрдэм шинжилгээний бүтээлийн сэдэв болсон эсвэл дадлагажигч эсвэл дадлагажигчдын тогтоосон бусад бүх эсрэг заалтууд.
- MID-TUBE-ийг их хэмжээний ивэрхийн ивэрхийн үед онцгой анхаарал хандуулах хэрэгтэй

## 4. ХЭРЭГЛЭЭ



Оруулахын өмнө датчийг тослох хэрэгтэй.

- Катетерийг эхлээд гарын үзүүрээр амаар оруулна. Катетерийг гэдэс рүү дамжуулна.
- Хагалгааны үеэр хадгалагдах ходоодны уутны хэмжээг тодорхойлоходоо MID-TUBE-ийн их биеийг ашиглана уу. Хадгалах хэсгийн хэмжээ, хэмжээ нь мэс засалчийн үнэлгээнээс хамаарна.
- Нэг буюу хэд хэдэн үдээстэй байх шаардлагатай бөгөөд хэрэглэгчид үдэгч бүрийн өмнө хоолойг хөдөлгөх ёстой бөгөөд хоолойн бие үдэгчд баригдахгүй байх ёстой.
- Үдээсийг бүрэн хийж дуусгасны дараа туршилтыг LEAK TEST д ашигласан өнгөт шингэнийг (жишээлбэл, хүнсний будаг) шахах, татахад ашиглаж болно. Энэ тохиолдолд сорох системийг MID-TUBE-тэй холбох ёстой. Хэрэв ходоодны салст бүрхэвчийг MID-TUBE-ийн уу зайлуулах цоорхойд сорсон бол MID-TUBE-ийг сорох эх үзвэрээс салгаж, сорохтой дахин холбохоос өмнө ходоодонд байрлах MID-TUBE хоолойг дахин байрлуулна уу.
- АНХААРУУЛГА: Хоолойг ходоод, улаан хоолойд сорох / усжуулах зорилгоор ашиглаж байх үед хөдөлж болохгүй, ингэснээр ходоод болон / эсвэл улаан хоолой гэмтэх аюултай.
- АНХААРУУЛГА: MID-TUBE-ийн хувьд MID131, хамгийн их вакуум түвшин -300 мбар (30kPa). Remove the tube.
- Гуурсыг ав.

## 5. ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТНИЙ ЧАДАВХИ

Зөвхөн таргалалтын мэс заслын чиглэлээр мэргэшсэн баг багтсан туршлагатай эмч нар л MID-TUBE ашиглаж болно.

**Анхааруулга:** Мэргэжилтнүүд ашиглахаасаа өмнө эдгээр заавруудтай бүрэн танилцах ёстой.



MID-TUBE тохируулгын гуурсыг улаан хоолой руу оруулснаар улаан хоолой цоорх эрсдэлийг бий болгодог. Үүнийг MID-TUBE-ийн хэрэглээний заавар, өвчтөний түүхийг мэддэг туршлагатай хэрэглэгч л хэрэгжүүлж чадна. Хэрэв танилцуулгыг өөр ажилтанд (эмч биш) шилжүүлсэн бол түүнийг энэ мэс засалд тусгайлан сургасан байх ёстой бөгөөд мэс засал нь мэс засалчийн бүрэн үүрэг хэвээр байх болно.

## 6. ХАДГАЛАХ НӨХЦӨЛ БОЛОН АРИУТГАЛ

**Хадгалалт:**

Бүтээгдэхүүнийг анхны сав баглаа боодол дээр нь хуурай, сэрүүн газар, гэрэл, нөлөөллөөс хамгаалж хадгална.

**Ариутгал:**

- MIDTUBE®-ийг ариутгасан сорьц (этилен оксидын ариутгал) -ийг баталгаажуулсан багцаар нийлүүлдэг. Хэрэглэхийн өмнө баглаа боодлын бүрэн бүтэн байдлыг шалгана уу. Гэмтсэн савлагаатай бүтээгдэхүүнийг бүү ашигла.
- Савалгаан дээр заасан хугацаа дууссаны дараа бүтээгдэхүүнийг бүү ашигла.
- Энэ нь нэг удаа хэрэглэх бүтээгдэхүүн юм – **ДАХИН АРИУТГАХГҮЙ / ДАХИН АШИГЛАХГҮЙ.**  
Хэрвээ зөвлөгөөг дагахгүй тохиолдолд дараах эрсдэлүүдтэй:
  - Ариутгасан нөхцөл нь MID-ээр батлагдсан аргуудаас гадуур баталгаагүй болно..
  - Хөрдөгч бохирдол нь мэс заслын дараах хүндрэлийн томоохон эрсдэл.
  - Төхөөрөмжийн гүйцэтгэлийн шинж чанарт баталгаагүй

## 7. СЭРЭМЖЛҮҮЛЭГ

- **ДАТЧИК НЬ ХОЁР ЦАГААС ИЛҮҮ УДААН АШИГЛАХ ЁСГҮЙ.**
- **ТӨХӨӨРӨМЖҮҮДИЙГ ҮЙЛДВЭРЛЭГЧИЙН ЧАНАРЫН БАТАЛГААНЫ БОДЛОГЫГ ХАНГАХЫН ТУЛД АЖИЛЛАЛТЫН ТОВЧ ТАЙЛААР БҮХИЙ MID БУЦААСАН БАРААНЫ БОДЛОГЫН ДАГУУ ШИНЖЭЭЧИЙН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ ЗОРИЛГООР ДИСТРИБЬЮТЕРТ БУЦААЖ ӨГӨХ БОЛОМЖТОЙ. БУЦАХААСАА ӨМНӨ MID-ТҮЙ ХОЛБОО БАРИНА УУ**
- **ЭНЭҮЙ ТӨХӨӨРӨМЖИЙГ ХЭРЭГЛЭСНЭЭР ӨВЧТӨН, ХЭРЭГЛЭГЧИД ЭСВЭЛ БУСАД ХАМҮҮСИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ МЭНДЭД ХОХИРОЛ УЧРУУЛАХ ЁСГҮЙ. ТӨХӨӨРӨМЖИЙГ ТУХАЙН УЛСЫН ОДООГИЙН ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ДАГУУ УСТГАЖ, УСТГАХ ЁСТОЙ.**
- MID-TUBE-ИЙГ ГЭМТЭЭЖ БОЛЗОШГҮЙ БАГАЖ ХЭРЭГСЭЛТЭЙ ХАМТ АШИГЛАХЫГ БҮҮ ЗӨВШӨӨР.
- АЛИВАА ГЭМТЭЛ, ОСЛЫН ҮЕД ҮНДСЭН ДОР ХАЯЖ НЭГ СЭЛБЭГ ХЭРЭГСЭЛТЭЙ БАЙХ.



For single use only



Store in a cool, dark, dry place



Do not use if package is opened or damaged

**Rx Only** “Caution : Federal Law restricts this device to sale by or on the order of a physician or a licensed practitioner”

Not made with natural rubber latex – ne contient pas de latex – kein latex– No Latex – No Lattice – não latex – Latexvrij

لا يحتوي هذا المنتج على مادة اللاتكس

**STERILE EO**

**CE** 0459

**POLITIQUE de RETOURS/RETURNED Goods POLICY**

Aucun retour produit ne peut se faire sans l'autorisation préalable de MID. Afin de connaître les modalités de retour merci de nous contacter à :

Authorization must be received from MID prior to return of the medical device. For particular return indications, please contact us:



**MID SAS** – 9, chemin du jubin – 69570 Dardilly  
FRANCE

Tel.: +33 (0)4 78 17 48 04 – Fax: +33 (0)4 72 82 91 23  
Email: [mid@mid-med.com](mailto:mid@mid-med.com) – website: [www.mid-med.com](http://www.mid-med.com)  
Instruction for use website: [www.mid-ifu.com](http://www.mid-ifu.com)

**MADE IN FRANCE**